

## AEP-01 AEP-02 / EYES CURE(アイキュア) レンズ加工案内

### 【推奨レンズについて(推奨順)】

- ① ポリカーボネイト
- ② トライベックス(ポリカ系)
- ③ 中屈折(ポリウレタン系)
- ④ 1.6 レンズ(CR系)

### 【推奨加工方法】

- ① レンズ加工機で、メタルフレームサイズ【0.0(ゼロゼロ)サイズ】にてカットしてください。
- ② フレーム前面より、レンズをフレームに押し込むように玉入れをしてください。
- ③ 入りにくい場合は、バフ掛けなど微調整をお願い致します。

- ご注意 -

ナイロン素材 (TR-90) の特性上、温風器で温めてもアセテート素材ほどフレームが柔らかくなることはありません。変形や火傷には十分ご注意ください。

- ・加工について不安が多い場合には、レンズメーカー様に加工依頼することをお勧めします。
- ・EYES CURE(アイキュア) はフレームが6カーブの為、5カーブ~6カーブの球面レンズを推奨致します。
- ・強度数になると、非球面レンズでは加工できない場合がございます。
- ・4カーブで加工できるかどうかは、弊社では判断しかねます。
- ・加工について不安が多い場合には、レンズメーカー様に加工依頼することをお勧めします。

加工についての最終判断は、個々の考え方・加工の経験則などの違いが有る為、小売店様にお任せ致します。ご了承ください。